



# MOTION 3D CLEAR Klebe-Guide

**CARRIERE**<sup>®</sup>  
**MOTION 3D**<sup>™</sup>



# Carriere® MOTION 3D CLEAR™ Klasse II-Apparatur

## Einfache Klebetechnik nach Dr. Dave Paquette

1. Bereiten Sie die zu beklebenden Zähne durch Ätzen, Spülen und Trocknen entsprechend der Standardprotokolle vor.
2. Tragen Sie zunächst eine dünne Schicht des Kunststoff-Conditioners oder Primers gemäß dem Standardprotokoll auf das Frontzahnpad der MOTION 3D CLEAR Apparatur auf.
3. Tragen Sie nun reichlich Kleber auf das Molarenpad der MOTION 3D CLEAR Apparatur auf und positionieren Sie dieses mithilfe des MOTION 3D Platzierungsinstruments auf dem Zahn. Fest andrücken und direkt lichthärten (Abb. 1). **Tipp:** Das Molarenpad sollte horizontal zu den Höckerspitzen geklebt werden.



4. Heben Sie in Höhe des zu beklebenden Eckzahns bzw. Prämolaren den Arm der MOTION 3D CLEAR Apparatur mitsamt des Frontzahn pads vorsichtig an. Tragen Sie anschließend reichlich Kleber direkt auf die Zahnoberfläche auf (Abb. 2).

**Tipp:** Da das Frontzahnpad der MOTION 3D CLEAR tiefe Rillen aufweist, verwenden Sie bitte die 2- bis 3-fache Menge an Kleber, die normalerweise für ein Gitternetzpad verwendet wird.



5. Drücken Sie das Frontzahnpad der MOTION 3D CLEAR Apparatur mithilfe eines Ligaturen Directors oder eines ähnlichen Instruments fest in den Kleber (Abb. 3).

**Tipp:** Sofern ausreichend Kleber verwendet wurde, wird der Überschuss entlang der okklusalen und gingivalen Ränder der Apparatur herausgedrückt. Um eine zusätzliche mechanische Retention zu erreichen, kann dieser Kleberüberschuss über die Ränder „gerollt“ werden.



6. Sofort lichthärten und dabei mittels Ligaturen Director weiterhin einen leichten Druck auf die MOTION 3D CLEAR Apparatur ausüben (Abb. 4).

